

**JEDNODUCHÝ
SPÔSOB
AKO ŽIVIŤ VAŠICH
PACIENTOV**



ISO 80369-3

Aktuálny štandard
pre bezpečné
enterálne živenie

Používajte ucelený systém produktov
Flocare® ENFit™

NUTRICIA
flocare®

PREČO KOMPLETNÝ SYSTÉM?



BEZPEČNEJŠÍ

Eliminácia možných zlyhaní ľudského faktora

Používaním kompletného systému Flocare® ENFit™ eliminujete možnosť chybného pripojenia.



RÝCHLEJŠÍ

Navzájom kompatibilný

Používaním kompletného systému Flocare® ENFit™ aplikačný materiál prepojíte jednoducho a rýchlo.



ĽAHŠÍ

Bez dodatočných konektorov

Systém Flocare® ENFit™ je navzájom kompatibilný. Pri používaní kompletného systému Flocare® ENFit™ sa vyhnete ťažkostiam spojeným s výberom vhodných konektorov pre rôzne použitia.



ŠTANDARDIZOVANÝ

Zameraný na zvýšenie bezpečnosti a kvality starostlivosti o pacientov

Používanie bezpečnejších výrobkov a postupov je súčasťou akreditačných noriem v zdravotníckych zariadeniach.



Spoločnosť Danone s.r.o. má **zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality na zdravotnícke pomôcky** podľa medzinárodnej normy EN ISO 13485:2016.

UĽAHČITE SI PRÁCU A MAJTE ISTOTU, ŽE PACIENT JE V BEZPEČÍ.
Používajte ENFit™ u všetkých aplikačných materiálov pre podávanie enterálnej výživy.

Vysvetlivky:



Výmena najneskôr po 24 hodinách



Bez obsahu ftalátov a latexu



CE certifikácia zdravotníckej pomôcky



Pre živenie gravitačným spádom



Pre enterálnu pumpu Flocare® Infinity™



Pre enterálnu pumpu Flocare® Infinity™ III



Transnazálna sonda



Perkutánná sonda



Živenie do žalúdka



Živenie do jejuna



Pre detských pacientov



Pre strednodobé živenie po dobu najdlhšie 6 týždňov





Pre dlhodobé živenie (predpokladaná doba živenia viac ako 2-3 týždne)

Medzinárodné farebné kódovanie Charriére:



NUTRICIA
flocare®


APLIKAČNÉ SONDY

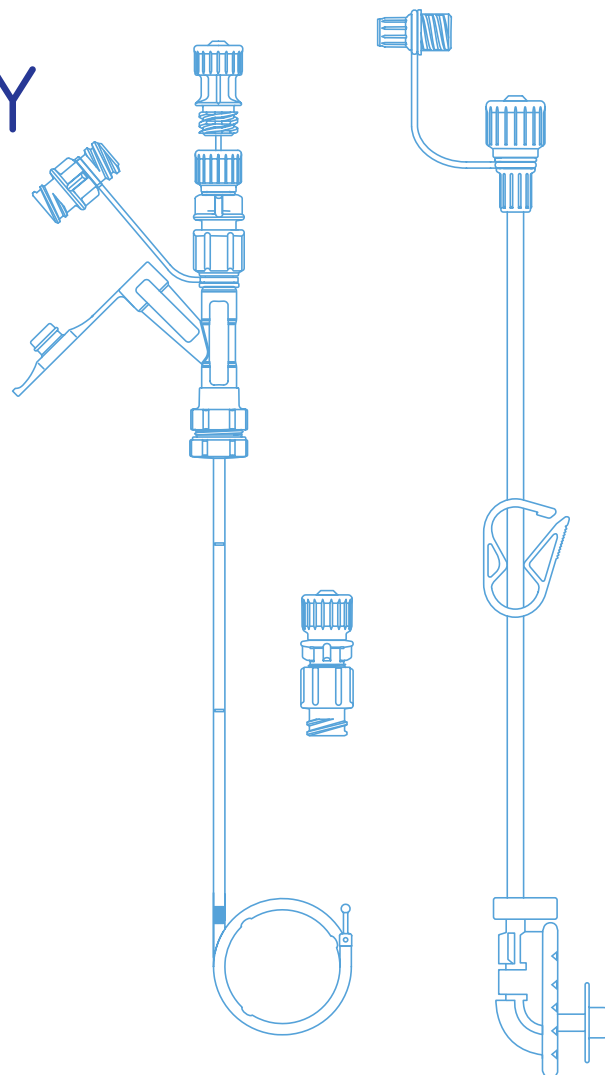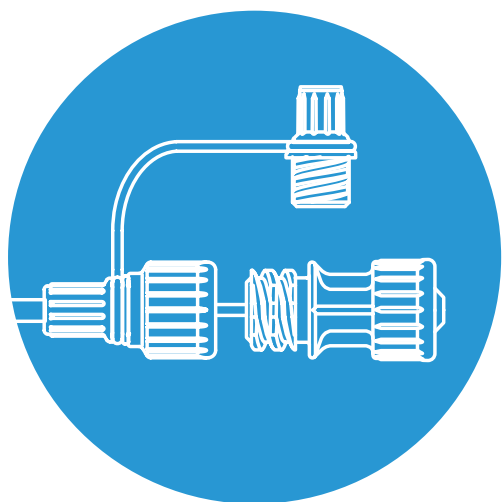


Sondy Flocaře® sú moderné a spoľahlivé zdravotnícke pomôcky na podanie enterálnej výživy, vyvinuté a vyrábané so zameraním na komfort pacienta a uľahčenie práce pre zdravotníkov. Sú vyrobené z materiálov šetrných k zdraviu i životnému prostrediu.

- odolný, komfortný a poddajný materiál
- zaoblené zakončenie pre jednoduché zavedenie
- bez obsahu latexu a DEHP
- so systémom konektorov ENFit™
- dlhodobá skladovateľnosť


Flocare[®] transnazálne sondy

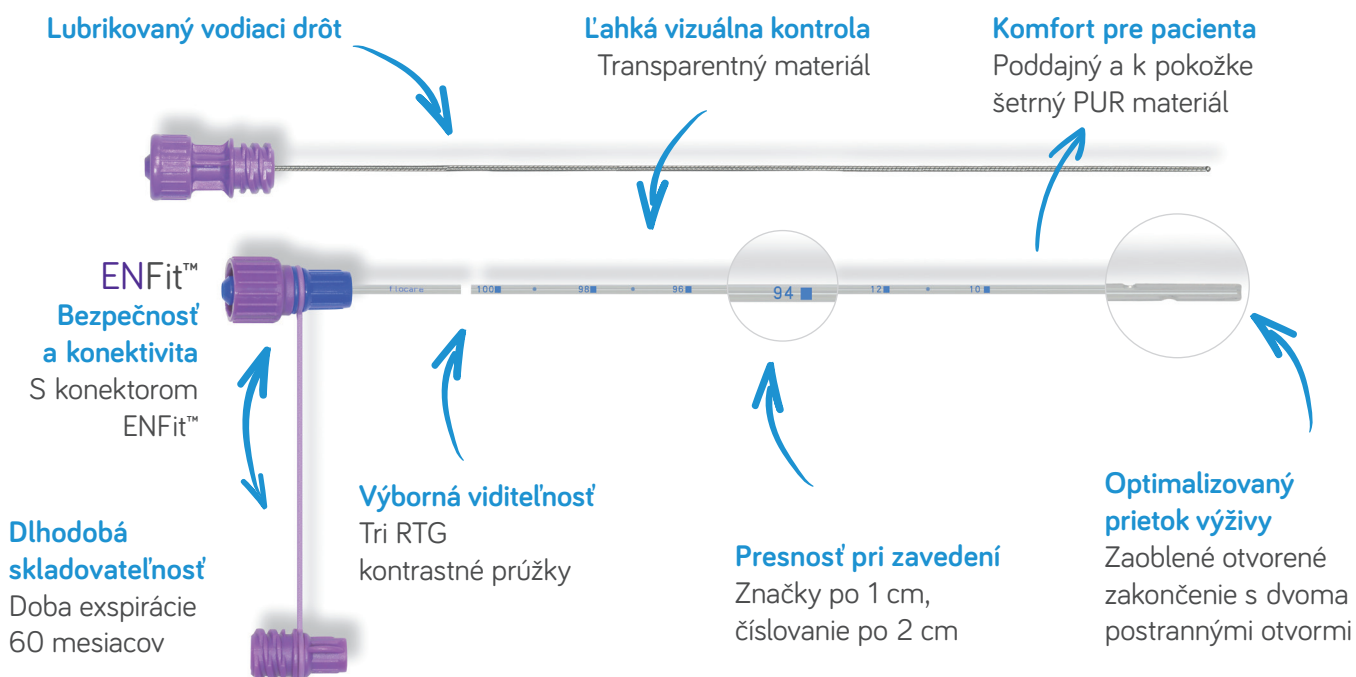

- Nazogastrická RTG kontrastná polyuretánová sonda s vodiacim drôtom a konektorom ENFit™ na optimálne strednodobé živenie do žalúdka (≤ 6 týždňov).
- Ľahko sa zavádza a prináša maximálny komfort pre pacienta.

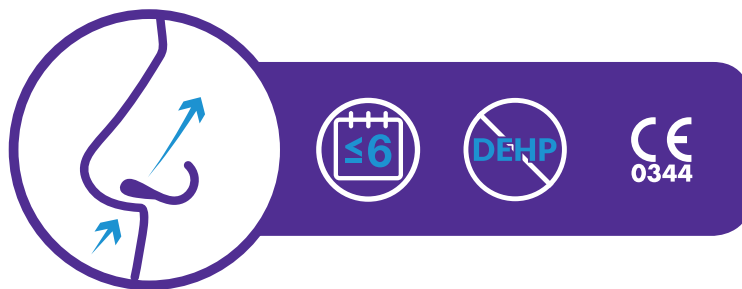

8 Flocare[®] Pur Tube (Ch8-110 cm) Sonda polyuretánová

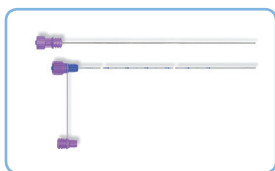

Kód ZP: P22157
REF: 594569

- Nazogastrická sonda
- S otvoreným zakončením
- Priesvit CH 8
- Dĺžka sondy 110 cm



Flocare® Bengmark® NI sondy

Výborná viditeľnosť
Tri RTG kontrastné pružky

Dĺžka sondy 145 cm

Lubrikovaný vodiaci drôt

Komfort pre pacienta
Poddajný a k pokožke šetrný PUR materiál

ENFit™
Bezpečnosť a konektivita
S konektorom ENFit™

Dlhodobá skladovateľnosť
Doba expirácie 60 mesiacov

Presnosť pri zavedení
Značky po 1 cm, číslovanie po 2 cm


Jednoduché zavedenie
Gulôčkové zakončenie pokryté vrstvou Hydromer®

Optimálna fixácia sondy
Patentovaná špirála Bengmark® s 2,5 slučkami s priemerom cca 3 cm a dĺžkou 23 cm

- Nazointestinálna rádiokontrastná polyuretánová sonda s dĺžkou 145 cm, s vodiacim drôtom a konektorom ENFit™.
- Vhodná na transnazálne živenie priamo do duodena alebo jejuna.
- Určená na strednodobé živenie pacientov (≤ 6 týždňov).
- Lahko sa zavádza a prináša maximálny komfort pre pacienta.
- Dostupná v 2 variantoch priesvitu.




8 Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch8-145 cm) Sonda výživová nazointestinálna

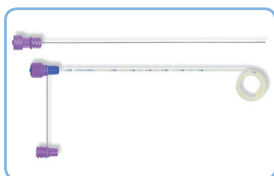

Kód ZP: P76735
REF: 594824



10 Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch10-145 cm) Sonda výživová nazointestinálna

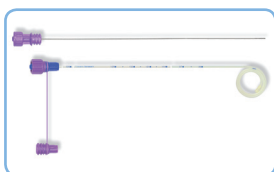

Kód ZP: P76735
REF: 594825



Indikácie sondy Flocare® Bengmark® NI

Táto sonda je indikovaná pacientom s funkčným intestinálnym traktom s oslabenou motilitou žalúdka a/alebo zvýšeným rizikom aspirácie (napr. v ranom pooperačnom období).

Indikácie pre postpylorickú sondovú výživu:

- Chirurgickí pacienti
- Pacienti s popáleninami
- Pacienti so zvýšeným rizikom aspirácie, refluxu a/alebo vracania
- Pacienti s obmedzenou motilitou žalúdka
- Pacienti s akútnou pankreatitídou

ZAVEDENIE SONDY

Nazointestinálne sondy by mali kvôli riziku nesprávneho zavedenia sondy a perforácie pažeráka alebo pľúc zavádzať iba vyškolení zdravotnícki pracovníci.

Návod na používanie u pacientov s (obmedzenou) motilitou žalúdka:

- 1 Informujte pacienta o postupe zavedenia. Vodiaci drôt úplne vsuňte do sondy a zabezpečte, aby bol pevne uchytený ku konektoru (obr. 1).
- 2 Pacienta uložte do pohodlnej polohy v sede alebo pololežiacky. Ak chcete stanoviť dĺžku sondy Bengmark®, ktorá má byť pacientovi zavedená, zmerajte vzdialenosť od špičky nosa (N) k uchu (E) a potom k mečovitému výbežku hrudnej kosti (X) (obr. 2). Sondy v tomto bode označte. Následne urobte ďalšie 2 značky 25cm a 50cm za prvou značkou.
- 3 Zakončenie a prvé cm sondy navlhčite vodou, aby ste uľahčili jej zavedenie (obr. 3).
- 4 Skontrolujte nosové dierky pacienta, či nie je vybočená nosová priehradka alebo viditeľné nosové polypy; použite väčšiu nosovú dierku a pretiahnite sondu cez spodnú časť nosovej dierky (obr. 4). V momente, keď sonda dosiahne oblasť hrdla, predkloňte hlavu pacienta a požiadať ho, aby prehltal tak často, ako je to možné. Sondy tlačte dopredu len opatrne, nikdy nie nasilu. Dávajte pozor, aby nedošlo k neúmyselnému zavedeniu sondy do priedušnice! V uvedenom postupe pokračujte, kým sa nedostanete k prvej vopred vyznačenej značke. Podanie nejakého nápoja alebo jedla (ak je to možné) môže stimulovať pohyb sondy.

Varovanie: V tomto štádiu nespájajte nazointestinálnu sondu Bengmark® so súpravou na podávanie výživy (obr. 5). Predtým, než cez sondu prejde akákoľvek tekutina, je potrebné overiť správne umiestnenie:

- sondu nepreplachujte
- vnútorný vodiaci drôt nevlhčite.

- 5 Skontrolujte polohu sondy:

(obr. 6) Odsatie žalúdočného obsahu

Odsajte obsah žalúdka cez konektor ENFit™ na vodiacom drôte.

(obr. 7) Meranie pH

Odmerajte hodnotu pH aspirátu. $pH \leq 5,5$ znamená správne umiestnenie sondy v žalúdku. Miestne predpisy z hľadiska prijateľnosti rozsahu pH na potvrdenie správneho umiestnenia nazogastrickej sondy sa môžu líšiť. Vždy sa riadte miestnymi predpismi.


(obr. 8) Röntgenová kontrola

V prípade, že nie je možné získať aspirát alebo nameraná hodnota pH je 5,5 alebo vyššia, skontrolujte umiestnenie sondy v žalúdku pomocou röntgenu.

Upozornenie: Postupujte podľa miestnych predpisov o radiačnej ochrane.

- 6 Po skontrolovaní polohy sondy (obr. 6, 7, 8) aplikujte najmenej 20–50ml vody na odstránenie obsahu žalúdka zo sondy (obr. 9).
- 7 Vytiahnite ± 25 cm vodiaceho drôtu zo sondy (obr. 10). Potom pokračujte v zavádzaní sondy, kým nedosiahnete druhú značku (obr. 11). V tomto bode vytiahnite celý vodiaci drôt zo sondy.
- 8 Sondy ešte nepripevňujte k nosu, použite na dočasnú fixáciu ušný lalôčik.
- 9 V priebehu 8–12 hodín motilita žalúdka posunie sondu cez pylorus (obr. 12). Zafixujte sondu, ak je tretia značka na sonde v polohe pri pacientovom nose (obr. 13).
- 10 Pred podaním akejkoľvek enterálnej výživy overte správne umiestnenie sondy pomocou röntgenu (obr. 14).

Zavedenie sondy je možné taktiež pomocou fluoroskopie, endoskopie alebo 2-krokovou RTG kontrolou, viď návod k použitiu.

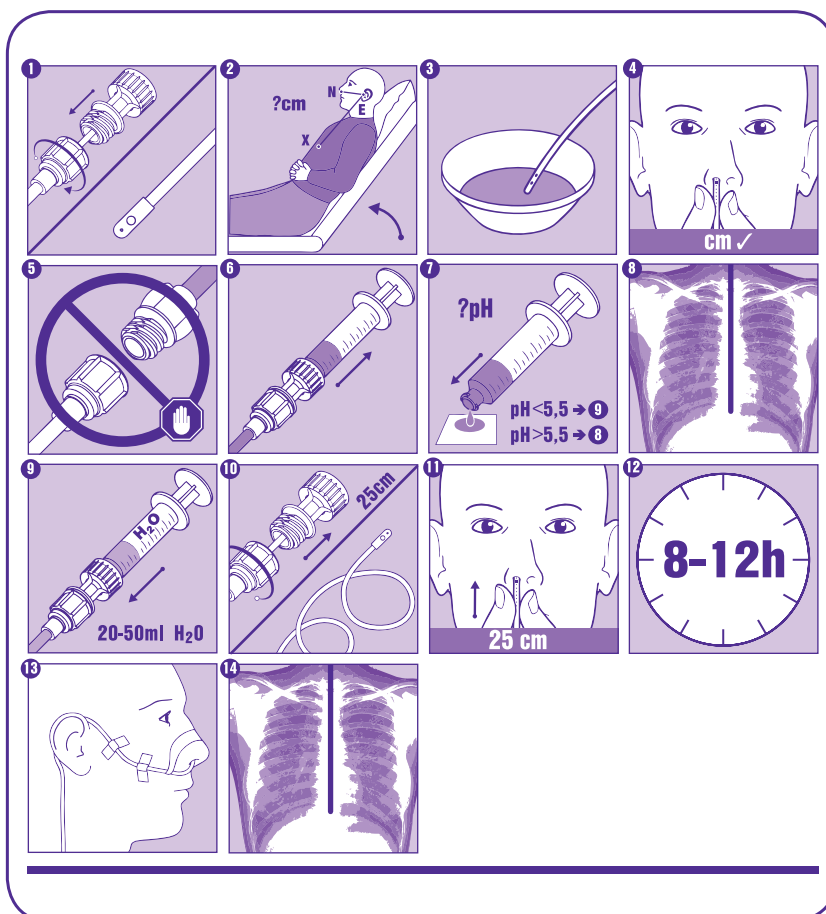

Pred použitím tejto zdravotníckej pomôcky je nutné prečítať celý návod na použitie.

Flocare® PEG súpravy

Jednoduché zavedenie

Zakončenie pokryté vrstvou Hydromer®

Komfort pre pacienta

Veľmi trvanlivý, poddajný a k pokožke šetrný materiál.

Výborná viditeľnosť

Tri RTG kontrastné pružky

Presnosť pri zavedení

Značky po 1 cm, číslovanie po 2 cm

ENFit™

Mimoriadna bezpečnosť

Modrá fixačná svorka a konektor ENFit™




Kvapkovitý tvar silikónového vonkajšieho kotúča

Dlhodobá skladovateľnosť

Doba expirácie 60 mesiacov

- Súprava Flocare® PEG pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu (PEG) je určená na zavedenie pomocou techniky „pull“, pri súčasnej endoskopickej kontrole.
- Zavedenie sondy PEG je indikované pri dlhodobom podávaní výživy pomocou sondy a pri žalúdočnej dekompresii.
- Dĺžka sondy 40 cm, dostupná vo verziách CH 10, CH 14 a CH 18.
- Súpravu CH 18 je možné využiť tiež na zavedenie PEG/ J.

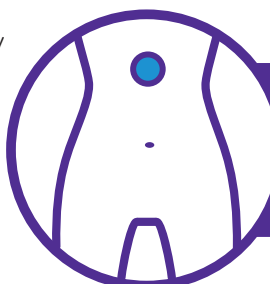

10 Flocare® PEG Set (Ch10)

Súprava pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu



Kód ZP: P76734
REF: 594820



14 Flocare® PEG Set (Ch14)

Súprava pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu



Kód ZP: P76734
REF: 594821



18 Flocare® PEG Set (Ch18)

Súprava pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu



Kód ZP: P76734
REF: 594822




Súčasti súpravy:

- 1 Transparentná PUR sonda s dĺžkou 40 cm, vnútorný silikónový fixačný disk
- 2 Vonkajší silikónový kotúč pre maximálne pohodlie pacienta
- 3 Modrá fixačná svorka sondy
- 4 Skalpel
- 5 Zavádzacia ihla s trokárom
- 6 Drôt s očkom na pohodlné a bezpečné napojenie na slučku sondy
- 7 ENFit™ konektor na podávanie výživy
- 8 Rýchlo uvoľniteľná svorka

Náhradné PEG konektory dostupné ako samostatné diely (pozrite str. 18): Flocare® PEG connector (CH 10 / CH 14 / CH 18)



Flocare® PEG/J sonda

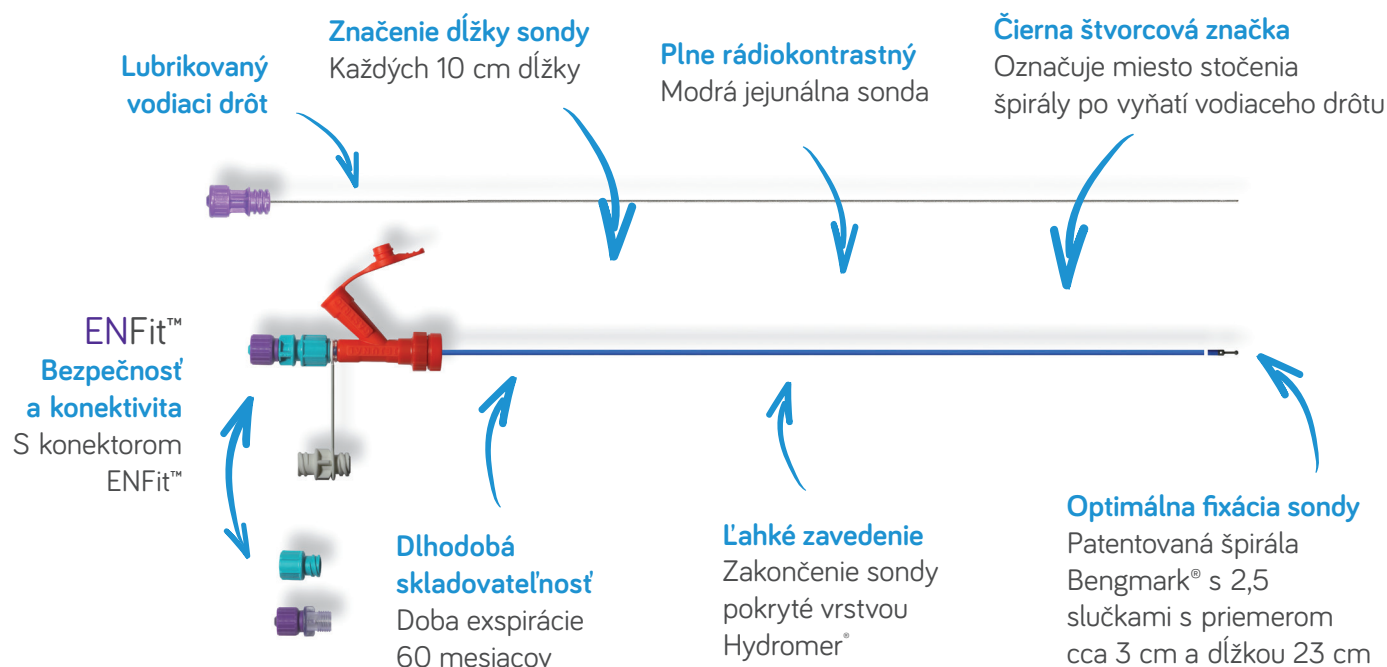


- Polyuretánová modrá sonda CH 9 s dĺžkou 105 cm, určená na endoskopické umiestnenie do jejuna cez sondu PEG CH 18.
- S vodiacim drôtom, patentovanou Bengmark® špirálou a anténym zakončením sondy.
- S konektorom ENFit™.
- Sonda PEG/J je určená na strednodobé živenie do jejuna.
- Výhoda použitia PEG/J sondy je predovšetkým v diskretnom umiestnení pod odevom pacienta a vyhnutí sa podráždeniu pokožky v okolí nosa.



9

Flocare® Bengmark® PEG/J for use with Flocare® PEG CH 18 (Ch9-105 cm)

Sonda výživová jejunálna na použitie s Flocare® PEG CH 18

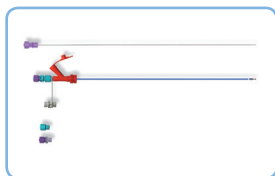


Kód ZP: P76737
REF: 594823



Časti sondy:

Sonda (A), anténne zakončenie s dvoma bočnými otvormi (B), prelubrikovaný kovový vodiaci drôt, čiastočne zasunutý do sondy (C). ENFit™ konektor: fialová (D) a tyrkysová (E) časť umožňujú spojenie jejunálnej sondy s Y-konektorom. Gastrické ústie Y konektora (F) je vybavené lievikovitým konektorom, ktorý umožňuje spojenie stupňovitého konektora s drenážnym vakom. Jejunálne ústie Y-konektora (G) je zostavené a pripojené k jejunálnej sonde. Y-konektor (červený): umožňuje dekompresiu žalúdka (aspiráciu žalúdočného obsahu) a zároveň živenie do tenkého čreva. Y-konektor zahŕňa vnútorný neoddeliteľný krúžok (H) pre pripojenie k súprave PEG, a ďalej samostatný - oddeliteľný, červený krúžok - matičku (I) pre pevnú fixáciu spojenia s PEG. Tyrkysový krúžok (J) v hornej časti Y-konektora umožňuje spojenie s jejunálnou sondou. Náhradné konektory pre fixáciu po umiestnení sondy do jejuna: transparentná (K) a tyrkysová časť (L)

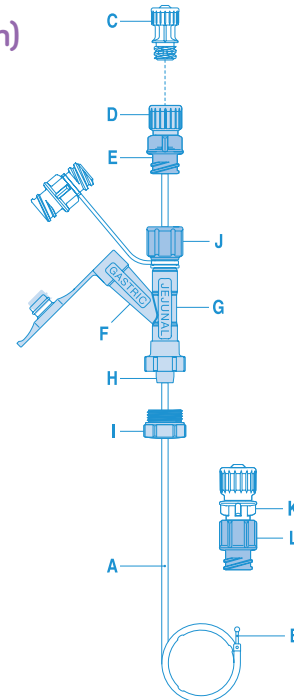


NUTRICIA
flocare®


POMÔCKY NA APLIKÁCIU ENTERÁLNEJ VÝŽIVY



Ostatné pomôcky
a príslušenstvo

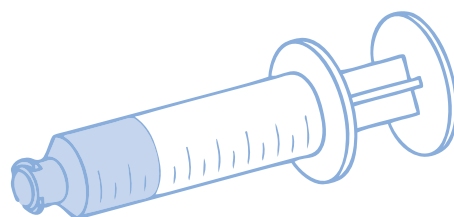

Enterálne pumpy
Flocare® Infinity™
a Flocare® Infinity™ III

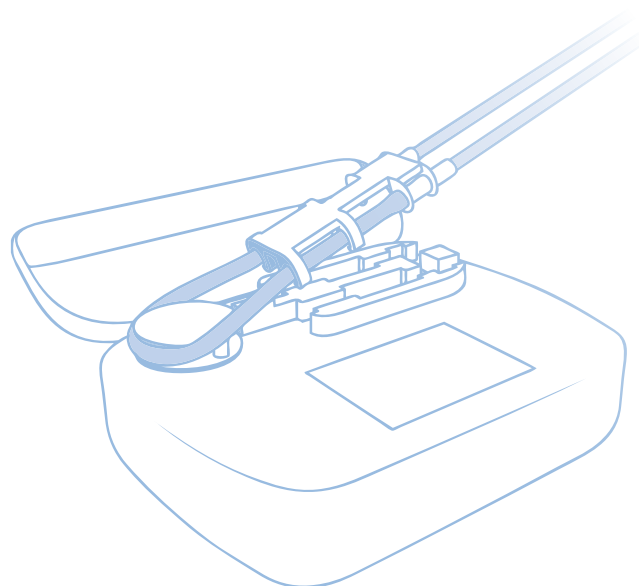

- malé, kompaktné, praktické
- spoľahlivé, bezpečné a jednoduché použitie
- výdrž batérie 24 hodín
- ľahko umývateľné i pod tečúcou vodou
- zákaznícka podpora (pravidelné technické kontroly a servis)
- zdravotnícke pomôcky

Enterálna pumpa Flocare® Infinity™ III

JEDNODUCHÉ PROGRAMOVANIE, PRENOSNÁ, SPOL' AHLIVÁ,
PRISPÔSOBITEĽNÁ



Flocare® Infinity™ III Enteral Feeding Pump Enterálna pumpa




ZP: P6860A
REF: 621825

Pumpa je určená na aplikáciu enterálnej výživy
iba prostredníctvom týchto aplikačných súprav:

- Flocare® Infinity™
Pack Set (REF: 586514)
Kód ZP: P96623



- Flocare® Infinity™ Pack
Mobile Set W/O MP
(REF: 586484)
Kód ZP: P96624

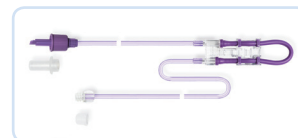

CE
0344



Enterálna pumpa Flocare® Infinity™

Kompaktná a ľahká
Rozmery 14 x 9,5 x 3,5 cm,
hmotnosť 392 g

**Jednoduché
a intuitívne ovládanie**

**Presnosť prietoku
s odchýlkou max. ± 5 %**
Pri použití súpravy Flocare®
Pack Set/Pack Mobile Set

**Detekcia
vzduchových bublín**

**Funguje
v akejkoľvek pozícii**
(je možné ju otáčať o 360°)

**Jednoduché
použitie**
Praktická
a užívateľsky
príjemná

**Anti-free flow
mechanizmus**



**Ochrana proti
prúdu vody IPX 5**
Pre ľahké čistenie
aj pod tečúcou vodou

**S prehľadným,
podsvieteným
LCD displejom**

**24-hodinová prevádzka
na batérie**
Doba dobíjania 6 hodín

Zákaznícka podpora
Pravidelné BTK
(bezpečnostno-technická kontrola)
i zabezpečenie servisu


Flocare® Infinity™ Enteral Feeding Pump Pumpa výživová enterálna




Kód ZP: P85008
REF: 35676

Pumpa je určená na aplikáciu enterálnej výživy
iba prostredníctvom týchto aplikačných súprav:

- Flocare® Infinity™
Pack Set (REF: 586514)
Kód ZP: P96623

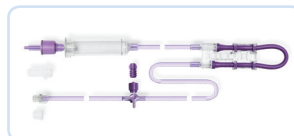



- Flocare® Infinity™ Pack
Mobile Set W/O MP
(REF: 586484)
Kód ZP: P96624

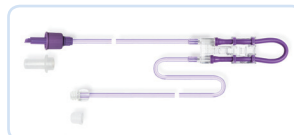

CE
0344



APLIKAČNÉ SÚPRAVY

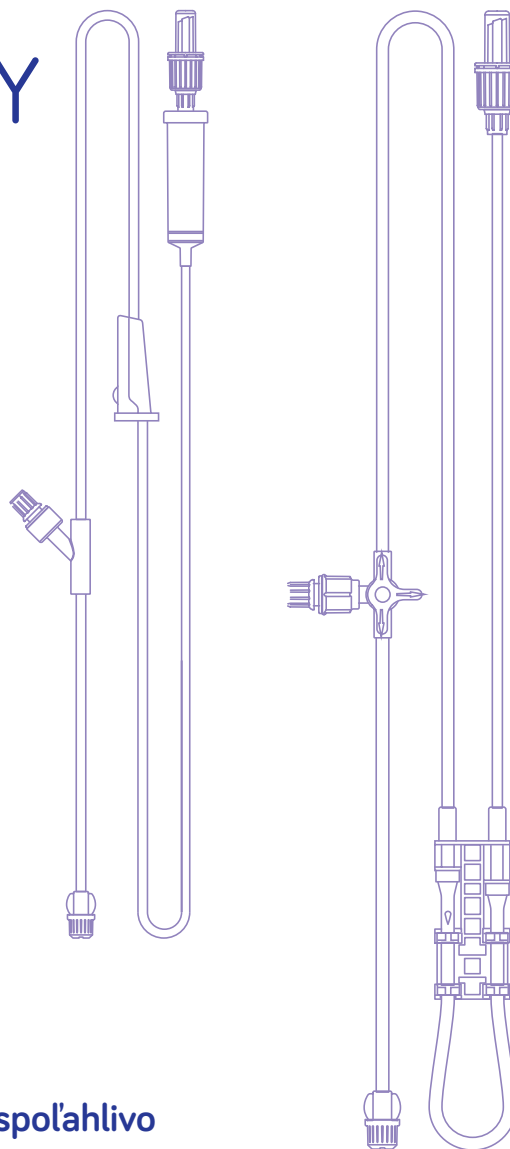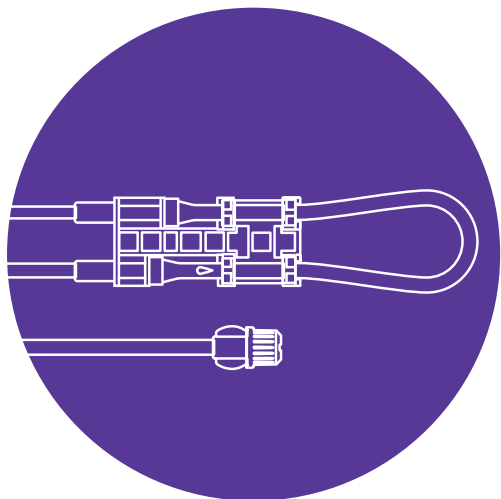

Súpravy Flocaře® sú zdravotnícke pomôcky, ktoré spoľahlivo podávajú enterálnu výživu Nutrison, Nutrini a ďalšiu.

Sú moderné, praktické a vyrobené z materiálov šetrných k zdraviu i životnému prostrediu. Identifikujete ich okrem iného vďaka fialovému odtieňu hadičiek.

- odolné a spoľahlivé
- fialová farba pre optické odlišenie
- komfortné materiály
- bez obsahu latexu a DEHP
- so systémom konektorov ENFit™

GRAVITAČNÉ SÚPRAVY

Dávkovanie s prehľadom
Transparentná kvapkacia komôrka (20 kvapiek = 1 ml)

Presné dávkovanie
Lahko ovládateľný regulátor prietoku

Fialová farba hadičiek
Pre optické odlišenie systému pre podávanie enterálnej výživy

ENFit™
Bezpečnosť a konektivita
S ENFit™ konektorom


Y medikačný port

Lahký prietok výživy
Vnútorný priemer hadičky – 3,9 mm

- Spoľahlivé gravitačné súpravy na podávanie enterálnej výživy s dĺžkou 180 cm.
- Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných materiálov bez obsahu latexu a DEHP.
- Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň ochrany zdravia pacienta.
- Dostupné v samostatných verziách pre vaky a pre fľaše.



Flocare® Gravity Bottle Set Súprava gravitačná na fľašu

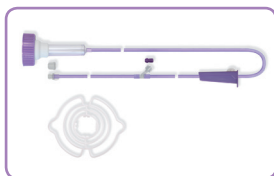

Kód ZP: P96622
REF: 590070

- Podanie výživy do sondy z fliaš
- Pre hrdlo Ø 40 / 26 mm
- S medikačným portom

Kompatibilný s fľašami:

Nutrison 500 ml
Infatrin 125 ml
Infatrin Peptisorb 200 ml



Flocare® Gravity Pack Set Súprava gravitačná na vak



Kód ZP: P96621
REF: 586460

- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- S medikačným portom

Kompatibilný s vakmi:


Nutrison, Nutriini

Kompatibilný s fľašami

OpTri bottle: Nutrison, Nutriini




Súpravy na pumpu Flocare® Infinity™

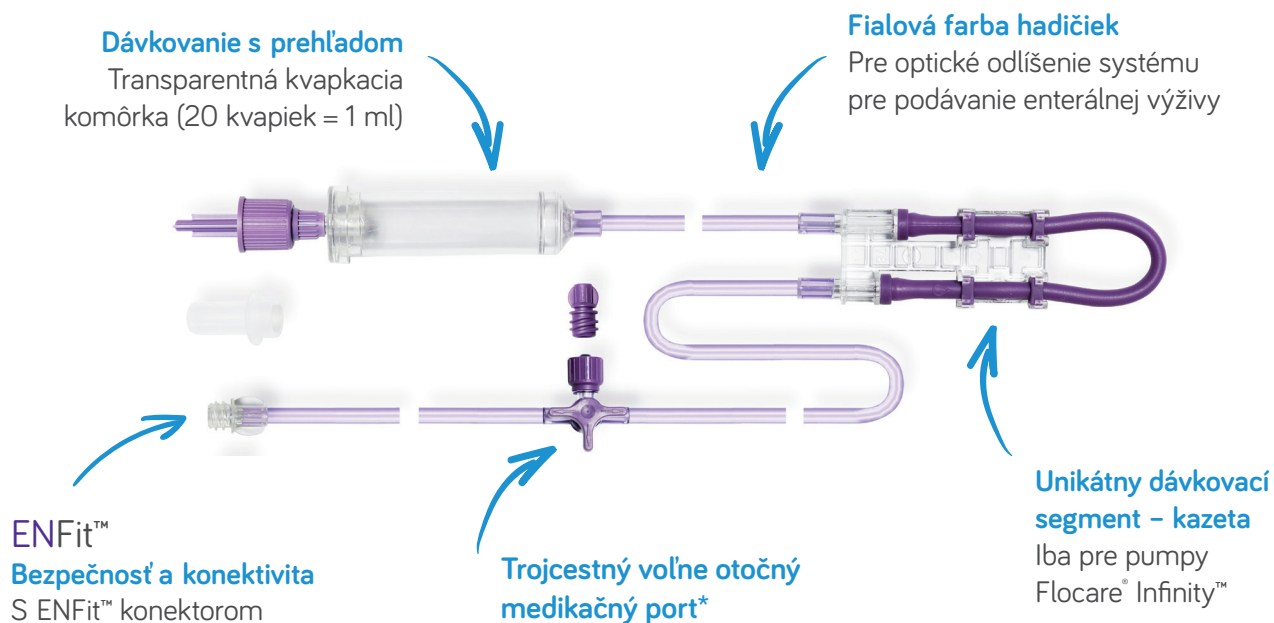

- Spolehlivé moderné súpravy na podávanie enterálnej výživy pomocou pumpy Flocare® Infinity™.
- Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných materiálov bez obsahu latexu a DEHP.
- Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň ochrany zdravia pacienta.
- Dostupné v bežnom a mobilnom variante.



Flocare® Infinity™ Pack Set Súprava pre pumpu Infinity™ na vak

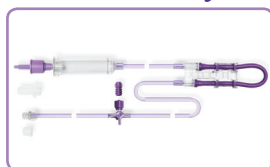


Kód ZP: P96623
REF: 586514

- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- Dĺžka súpravy 230 cm
- S medikačným portom

Kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutriini
Kompatibilný s fľašami
OpTri bottle: Nutrison, Nutriini



Flocare® Infinity™ Pack Mobile Set W/O MP Súprava pre pumpu na vak mobilná bez portu na podávanie liekov

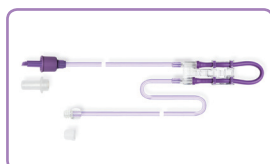

Kód ZP: P96624
REF: 586484

- Podanie výživy do sondy z vakov a fliaš OpTri bottle
- Dĺžka súpravy 158 cm
- Bez medikačného portu

Kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutriini
Kompatibilný s fľašami
OpTri bottle: Nutrison, Nutriini



*Nie je u verzie mobile W/O MP

Prehľad konektorov a adaptérov

Bolusový adaptér na striekačku ENFit™

- Adaptér na hrdlo vaku umožňuje natiehanie bolusovej dávky enterálnej výživy priamo z vaku do striekačky ENFit™.

Flocare® Bolus Adaptor Flocare® Bolusový adaptér na striekačku



Kód ZP: P98779
REF: 690390

● Balenie 1 ks

Univerzálny adaptér na fľašu

- Adaptér je určený na podanie sondovej enterálnej výživy z fliaš s hrdlom Ø 40 mm a Ø 26 mm. Je kompatibilný s fľašami prípravku Nutrison 500 ml, Infatrini 125 ml, Infatrini Peptisorb 200 ml a Nutriini 200 ml.

40 mm Screw Cap To Enplus Adapter Univerzálny adaptér na fľašu



Kód ZP: P5606A
REF: 689114 (A120)

● Balenie 1 ks

Nutricia Flocare® PEG konektory

- Náhradné konektory pre aplikáciu výživy do PEG s ENFit™ konektorom. Kompatibilné s ENFit™ enterálnou striekačkou i výživovými súpravami.

Flocare® PEG Connector

10 CH10



Kód ZP: P98780
REF: 591397

● Balenie 1 ks

Flocare® PEG Connector

14 CH14



Kód ZP: P98780
REF: 591395

● Balenie 1 ks

Flocare® PEG Connector

18 CH18



Kód ZP: P98780
REF: 591396

● Balenie 1 ks

Prechodné konektory

- Prechodné konektory zaisťujú kompatibilitu systému ENFit™ s ostatnými systémami enterálnej výživy

Transition Step Connector to Funnel Tube Prechodný stupňovitý konektor



Kód ZP: P6021A
REF: 589828

● Balenie 30 ks (6x5 ks)

Transition Connector to Reversed Luer Medport Prechodný konektor na sondu Luer



Kód ZP: P6021A
REF: 589733

● Balenie 30 ks (6x5 ks)

Transition Connector to Oral/Luer Syringe Prechodný konektor na striekačku Oral/Luer



Kód ZP: P6021A
REF: 589738

● Balenie 30 ks (6x5 ks)






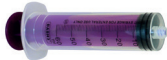


Transition Connector to Female Luer Syringe Prechodný konektor na set Luer




Kód ZP: P6021A
REF: 589735

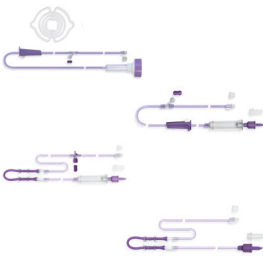● Balenie 30 ks (6x5 ks)

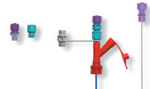Prehľad produktov

Názov produktu	Obrázok produktu	Kód ZP	REF kód	Balenie
Nutricia Flocare® výživové súpravy				
Flocare® Gravity Bottle Set		P96622	590070	30 ks
Flocare® Gravity Pack Set		P96621	586460	30 ks
Flocare® Infinity™ Pack Set		P96623	586514	30 ks
Flocare® Infinity™ Pack Mobile Set W/O MP		P96624	586484	30 ks
Nutricia Flocare® PEG sety				
Flocare® PEG Set (Ch10)		P76734	594820	1 ks
Flocare® PEG Set (Ch14)		P76734	594821	1 ks
Flocare® PEG Set (Ch18)		P76734	594822	1 ks
Nutricia Flocare® sondy Bengmark®				
Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch8-145 cm)		P76735	594824	1 ks
Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch10-145 cm)		P76735	594825	1 ks
Nutricia Flocare® sonda PEG/J				
Flocare® Bengmark® PEG/J for use with Flocare® PEG CH 18 (Ch9-105 cm)		P76737	594823	1 ks
Nutricia Flocare® sondy				
Flocare® PUR Tube (Ch8-110 cm)		P22157	594569	1 ks
ENFit® enterálna striekačka				
D-3NTERAL™ Enteral Syringe 60 ml Single Use ENFit®		P1074A	124823	1 ks
Nutricia Flocare® enterálne pumpy				
Flocare® Infinity™ III Enteral Feeding Pump		P6860A	621825	1 ks
Flocare® Infinity™ Enteral Feeding Pump		P85008	35676	1 ks

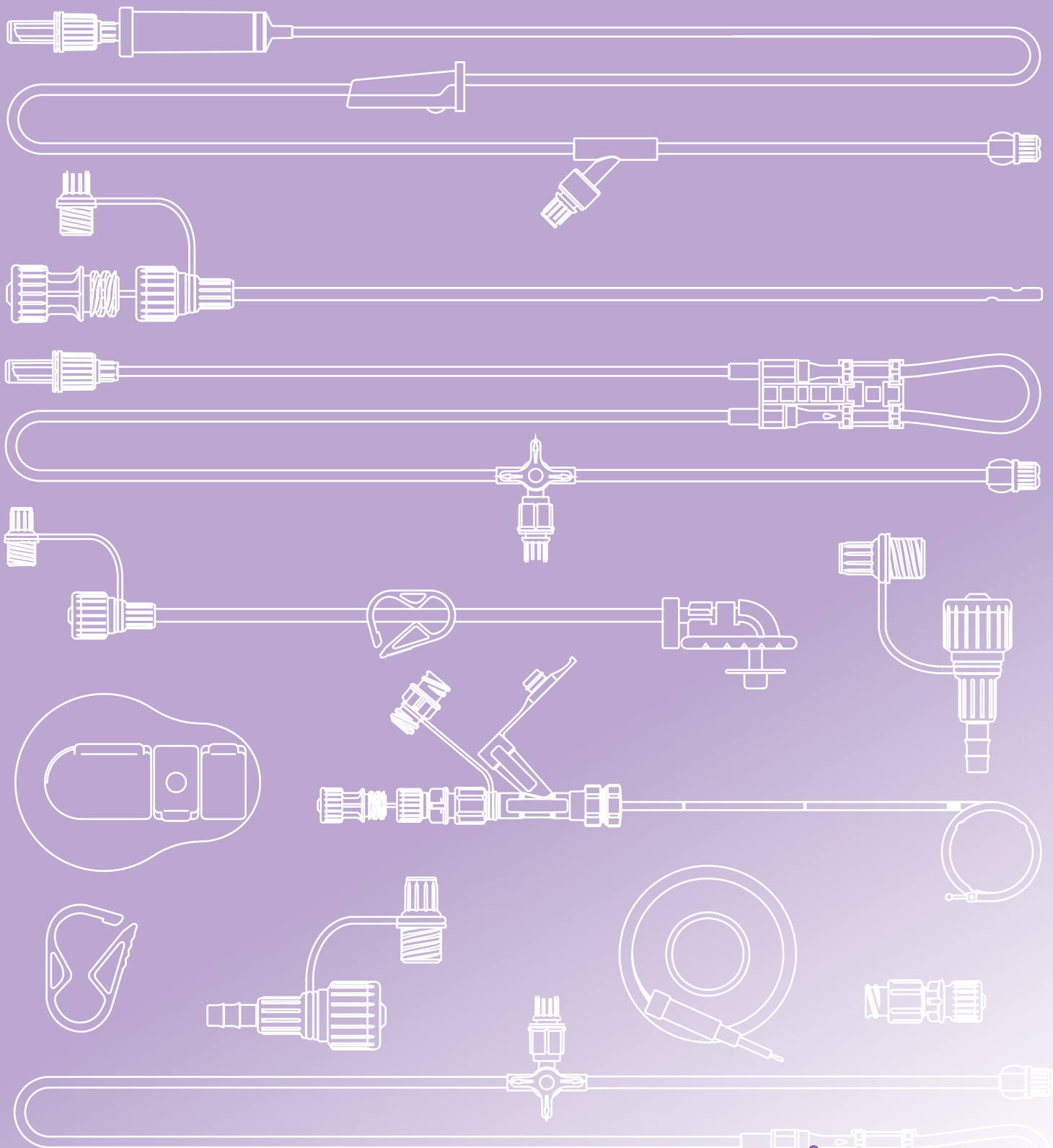

www.e.nutricia.sk



Distribúcia: Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Infolinka: 0800 444 006
www.e.nutricia.sk

Zdravotnicke pomôcky a aplikačný materiál sú určené na podanie enterálnej výživy.

Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.
Starostlivo si prečítajte návody zdravotníckych pomôcok na www.e.nutricia.sk

NUTRICIA
floca^{re}