


Flocare® Bolus Adaptor

REF 690390

MD



STERILE EO

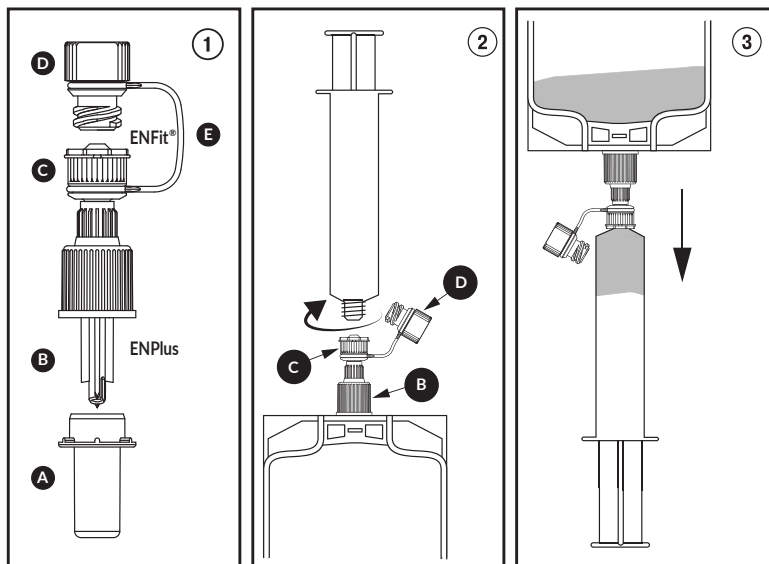


Popis pomôcky (Kresba ①):

- A. Protiprachový uzáver proximálneho konca ENPlus.
- B. Proximálny koniec ENPlus na pripojenie k nádobe na podávanie enterálnej výživy.
- C. Samčí port ENFit® pre spojenie so striekačkou ENFit®.
- D. Uzáver ENFit® s vnútorným závitom.
- E. Popruh uzáveru ENFit® s vnútorným závitom.

Bolusový adaptér Flocare®. Táto pomôcka je určená na pripojenie flexibilných nádob enterálnej výživy vybavených portom ENPlus k striekačkám ENFit® na bolusové podávanie výživy. Pomôcka je určená na enterálnu výživu pacientov. Pomôcka je určená na použitie zdravotníckym odborníkom, neodborníkom a pacientom po riadnom zaškolení. ⚠️ **Varovania:** Len na enterálne použitie. ⚠️ Nie je určené na intravenózne použitie. Nepoužívajte po dobu dlhšiu než 24 hodín. **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je štítok neúplný alebo nečitateľný. Vždy zabezpečte primerané sledovanie pacienta. Malé časti predstavujú potenciálne riziko udusenía. Používajte toto zariadenie stanoveným spôsobom. Používajte pod dohľadom dospeléj osoby. V prípade podávania liekov pacientovi vždy skontrolujte, či sú lieky podávané prostredníctvom adaptéra vhodné na enterálne podávanie výživy. Akákoľvek renovácia (obzvlášť sterilizácia) môže narušiť celistvosť zariadenia. Zariadenie sa po použití a v prípade opätovného použitia môže stať zdrojom infekcie a jeho funkčnosť sa môže zmeniť. **Dôležité upozornenia:** Pripravené na použitie. ⚠️ DEHP: pridané nezámerne počas výrobného procesu. Pri výrobe nebol použitý BPA alebo prírodný gumový latex. V prípade transportu a likvidácie zariadenia dodržiavajte správnu klinickú prax a všetky miestne a národné predpisy. Závažnú nehodu okamžite nahláste výrobcovi a príslušným orgánom vo vašej krajine. 📄 Pokyny na použitie sú dostupné na www.cedicbio.com.

Pokyny na použitie: 1. Umyte si ruky a dodržiavajte správne hygienické postupy. 2. Skontrolujte, či je nádoba určená ako zásobník na prívod enterálnej výživy. Nepripájajte adaptér k zásobníkom, ktoré nie sú určené na prívod enterálnej výživy. 3. Odstráňte uzáver (ak sa používa) zo zásobníka na enterálnu výživu. 4. Odstráňte uzáver **A** z proximálneho konca ENPlus **B**. 5. Pevne naskrutkujte proximálny koniec ENPlus **B** na krížový port nádoby na podávanie enterálnej výživy. 6. Odstráňte uzáver ENFit® s vnútorným závitom **D** z portu ENFit® **C**. 7. Odstráňte uzáver (ak je to relevantné) z injekčnej striekačky ENFit®. 8. Bezpečne zaskrutkujte striekačku ENFit® do samčieho portu ENFit® **C** (pozri kresbu ②). 9. Otočte nádobu hore dnom, pričom pevne držte celú jednotku na vytiahnutie kvapaliny cez striekačku (pozri kresbu ③). 10. V prípade potreby opakujte krok 9 bez odpojenia adaptéra od nádoby medzi za sebou idúcimi odbermi. Adaptér odpojte a zlikvidujte najneskôr 24 hodín od začiatku jeho používania. Viac informácií o indikáciách a trvaní používania nájdete v návode na použitie injekčnej striekačky.

C **€** 0123  **Cedic srl**
Via Liberazione 63/9, 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy
 www.cedicbio.com

Informácie poskytl na základe originálneho návodu na použitie C01489-00 - 10FEB2023:
Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov. Infolinka: 0800 444 006
NUT1300, SAP materiálu: 195687